


## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POKRYCIA FLEX Duo

Flex Duo to protetyczne pokrycie kosmetyczne zaprojektowane dla protez kończyn. Jest to wyposażenie, stanowiące warstwę wypełniającą dla protez kończyn. Stosuje się je dla osób po amputacji kończyny dolnej – udowej powyżej kolana (AK). **Przed założeniem pokrycia na protezę proszę zapoznać się z zaleceniami producenta protezy, dotyczącymi jej użytkowania.** Założenie pokrycia Flex Duo powinno zostać wykonane przez sprzedawcę protezy kończyny, zakład protetyczny lub przedszkolonego fachowca. Użytkownika należy poinstruować o prawidłowym postępowaniu z produktem.

### Pokrycie Flex Duo

Jeśli na protezie założone jest inne pokrycie Flex ( AK/Neo ) należy je zdjąć. Jeżeli dostarczone pokrycie Duo nie posiada otworu na zawór-wentyl, a jest wymagany, to należy go wykonać. Jeśli założenie pokrycia Flex Duo wymaga odkręcenia protezy stopy, aby założyć pokrycie należy odkręcić **jedynie dwie sąsiednie śruby** mocujące piramidę stopy, a następnie wsunąć pokrycie na lej protetyczny i przykręcić śruby mocujące piramidę stopy. Wszystkie śruby mocujące piramidę stopy przykręcamy kluczem dynamometrycznym zgodnie z zaleceniami producenta protezy, stosując dodatkowo specjalny klej do gwintów.

Umieścić pokrycie Duo ściśle na leju i dokładnie dopasować. Dolna część pokrycia Duo powinna znajdować się około 8 cm poniżej górnej krawędzi kolana protetycznego. Jeżeli pokrycie Duo jest luźne, nie trzyma się leja lub ma tendencje do zsuwania się w dół, należy przykleić do leja taśmę z pianki, aby zwiększyć nieco obwód. Pokrycie Duo powinno samo utrzymywać pozycję docelową na leju.

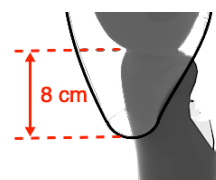

Natomiast jeśli pokrycie Flex Duo jest zbyt ciasne, można je lekko podgrzać **od wewnętrznej strony**, używając do tego nagrzewnicy elektrycznej, zachowując szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do przegrzania, odkształcenia lub odbarwienia pokrycia.

Po dopasowaniu pokrycia Duo należy zsunąć pokrycie i oczyścić **lej** acetonem lub rozpuszczalnikiem nitro, w miejscu mocowania taśmy dwustronnej. Następnie przykleić dostarczoną taśmę dwustronną **do pokrycia Duo** przy jego górnej krawędzi. Umieścić pokrycie Duo w miejscu docelowym, lekko odchylić górną część pokrycia i zdjąć papier ochronny z taśmy dwustronnej, a następnie docisnąć pokrycie Duo do leja protetycznego.

### ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Stosując pokrycie Flex Duo, proszę uwzględnić wytyczne producenta protezy, co do sposobów jej użytkowania.



Jeżeli Flex Duo ma być użytkowany przez dzieci, muszą zostać pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania. Konserwacja pokrycia musi się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.

O ile konstrukcja protezy kolana umożliwia klęknięcie, wówczas podczas użytkowania pokrycia Flex Duo proszę zachować ostrożność przy klękaniu oraz w miarę możliwości zastosować miękkie podłoże ( np. podkładając coś miękkiego pod kolano).

Trzymać z dala od źródła ognia.

Unikać narażania nakładki na silne uderzenia, ściskanie elementów nakładki oraz na kontakt z ostrymi przedmiotami.



Nie wystawiać na długotrwałe silne nasłonecznienie, nie stawiać w pobliżu źródła ciepła.

Nie stosować preparatów chemicznych na zewnętrznej stronie pokrycia.

Jeśli proteza nie jest wodoodporna lub do uprawiania sportów wodnych, przy użytkowaniu pokrycia Flex zachować ostrożność przy wykonywaniu czynności z użyciem wody, aby nie zamoczyć protezy kolana lub stopy.



## Konserwacja

Czyścić wilgotną gąbką.

Po zdjęciu pokrycia Flex Duo z protezy można czyścić je delikatnie gąbką nasączoną wodą. Do usunięcia zanieczyszczeń można użyć delikatnego środka czyszczącego w płynie lub mydła, wytrzeć do sucha.

### **WARUNKI GWARANCJI POKRYCIA FLEX**

#### §1

NEXTT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ( ul. Harcerska 6, 41-103 Siemianowice Śląskie) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000470222 oraz posiadająca numer NIP 643-176-35-79, zapewnia użytkownika o dobrej jakości produktu, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna.

#### §2

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 1 rok i liczy się od daty nabycia produktu, jednak nie więcej niż 13 miesięcy od daty produkcji. Wady produktu w okresie gwarancji powinny być zgłaszane mailem na adres [nextt@nextt.pl](mailto:nextt@nextt.pl).

#### §3

W przypadku wad lub uszkodzeń produktu mających wpływ na funkcjonalność produktu ujawnionych w okresie gwarancji NEXTT Sp. z o.o. bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt na nowy w możliwie najkrótszym terminie, pod warunkiem, że produkt jest używany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami producenta. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek normalnego użytkowania, a także czynności związane z konserwacją i czyszczeniem produktu.

#### §4

Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, jeżeli powstały one z przyczyn innych aniżeli tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu ( tj. innych aniżeli wady powstałe z winy producenta na skutek wad fabrycznych i materiałowych ). W szczególności gwarant jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli uszkodzenie powstało z winy kupującego. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek :

- Uszkodzeń mechanicznych, zarysowań, przegrzania produktu
- Nadmiernej eksploatacji produktu
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji
- Ingerencji w produkt, samowolnych napraw, przeróbek i zmian w produkcie, ingerencji nieuprawnionych osób trzecich
- Użycia niewłaściwych materiałów konserwujących
- Zabrudzenia, przebarwień na skutek kontaktu z substancjami chemicznymi lub kosmetykami