

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POKRYCIA FLEX Neo

Flex Neo to protetyczne pokrycie kosmetyczne zaprojektowane dla protez kończyn. Jest to wyposażenie, stanowiące warstwę dekoracyjną dla protez kończyn. Stosuje się je dla osób po amputacji kończyny dolnej – udowej powyżej kolana (AK) i goleniowej poniżej kolana (BK). Przed założeniem pokrycia na protezę proszę zapoznać się z zaleceniami producenta protezy, dotyczącymi jej użytkowania. Pokrycie Flex Neo zawiera magnesy neodymowe wytwarzające pole magnetyczne, osoby z rozrusznikami serca przed zakupem pokrycia Flex Neo powinny skonsultować się z lekarzem. Założenie pokrycia Flex Neo może zostać wykonane przez sprzedawcę protezy kończyny, zakład protetyczny lub przedszkolonego fachowca. Użytkownika należy poinstruować o prawidłowym postępowaniu z produktem. Pokrycie Flex Neo może zostać założone przez użytkownika protezy, pod warunkiem przestrzegania Instrukcji Użytkowania.

Pokrycie Flex Neo AK i BK

Aby założyć pokrycie Flex Neo należy rozchylić tylne rozcięcie pokrycia na boki i nałożyć na protezę. Po nałożeniu magnesy znajdujące się w tylnej części połączą pokrycie. Jeżeli pokrycie będzie przesuwać się podczas chodzenia, należy przykleić dostarczony rzep pomiędzy protezę i pokrycie w miejscu gdzie pokrycie wewnątrz styka się z protezą (np. z boku kolana czy adaptera rurowego). W przypadku pokryć Flex Neo BK dostarczony rzep można przykleić pomiędzy lejem a pokryciem. Miejsce przyklejenia rzepu należy wcześniej bardzo dokładnie odtłuścić. Pokrycie Flex Neo odtłuszczamy jedynie wewnątrz (!) acetonem, a miejsca na protezie np. denaturatem czy benzyną ekstrakcyjną. Proszę zwrócić szczególną uwagę, by nie stosować w/w produktów chemicznych na zewnętrznej stronie pokrycia, ponieważ powierzchnia wykończenia może ulec uszkodzeniu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Stosując pokrycie Flex Neo, proszę uwzględnić wytyczne producenta protezy, co do sposobów jej użytkowania.



Jeżeli Flex Neo ma być użytkowany przez dzieci, muszą zostać pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania. Konserwacja pokrycia musi się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej. W przypadku zniszczenia pokrycia i wydostania się magnesów na zewnątrz, dzieciom NIGDY nie można pozwolić bawić się magnesami neodymowymi => **niebezpieczeństwo przyszczygnięcia palców, polknięcia.**

O ile konstrukcja protezy kolana umożliwia kłęknięcie, wówczas podczas użytkowania pokrycia Flex Neo proszę zachować ostrożność przy kłękaniu oraz w miarę możliwości zastosować miękkie podłoże (np. podkładając coś miękkiego pod kolano).

Trzymać z dala od źródła ognia.

Unikać narażania nakładki na silne uderzenia, ściskanie elementów nakładki oraz na kontakt z ostrymi przedmiotami.

Nie wystawiać na długotrwałe silne nasłonecznienie, nie stawiać w pobliżu źródła ciepła.

Nie stosować preparatów chemicznych na zewnętrznej stronie pokrycia.

Jeśli proteza nie jest wodoodporna lub do uprawiania sportów wodnych, przy użytkowaniu pokrycia Flex zachować ostrożność przy wykonywaniu czynności z użyciem wody, aby nie zamoczyć protezy kolana lub stopy.

Pokrycie Flex Neo **zawiera magnesy**, proszę zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania badań diagnostycznych, procedur terapeutycznych lub innych procedur. Pokrycie należy bezwzględnie zdjąć przed wykonywaniem badań lub czynności, podczas których obecność magnesów może mieć wpływ na badanie lub inne urządzenia.

Trzymać z dala od osób z rozrusznikiem serca.

Proszę nie przechowywać pokrycia Flex Neo blisko telefonów komórkowych, kart magnetycznych i innych urządzeń, na które mogą mieć wpływ magnesy.



Konserwacja

Czyścić wilgotną ściereczką.

Po zdjęciu pokrycia Flex Neo z protezy można czyścić je delikatnie ściereczką nasączoną wodą lub zanurzyć w wodzie. Do usunięcia zanieczyszczeń można użyć delikatnego środka czyszczącego w płynie lub mydła, wytrzeć do sucha.

WARUNKI GWARANCJI POKRYCIA FLEX

§1

NEXTT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (ul. Harcerska 6, 41-103 Siemianowice Śląskie) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000470222 oraz posiadająca numer NIP 643-176-35-79, zapewnia użytkownika o dobrej jakości produktu, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna.

§2

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 1 rok i liczy się od daty nabycia produktu, jednak nie więcej niż 13 miesięcy od daty produkcji. Wady produktu w okresie gwarancji powinny być zgłaszane mailem na adres nextt@nextt.pl.

§3

W przypadku wad lub uszkodzeń produktu mających wpływ na funkcjonalność produktu ujawnionych w okresie gwarancji NEXTT Sp. z o.o. bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt na nowy w możliwie najkrótszym terminie, pod warunkiem, że produkt jest używany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami producenta. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek normalnego użytkowania, a także czynności związane z konserwacją i czyszczeniem produktu.

§4

Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, jeżeli powstały one z przyczyn innych aniżeli tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu (tj. innych aniżeli wady powstałe z winy producenta na skutek wad fabrycznych i materiałowych). W szczególności gwarant jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli uszkodzenie powstało z winy kupującego. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek :

- Uszkodzeń mechanicznych, zarysowań, przegrzania produktu
- Nadmiernej eksploatacji produktu
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji
- Ingerencji w produkt, samowolnych napraw, przeróbek i zmian w produkcie, ingerencji nieuprawnionych osób trzecich
- Użycia niewłaściwych materiałów konserwujących
- Zabrudzenia, przebarwień na skutek kontaktu z substancjami chemicznymi lub kosmetykami

