

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POKRYCIA X - COVER

X Cover to protetyczne pokrycia kosmetyczne zaprojektowane dla protez kończyn. Jest to wyposażenie, stanowiące warstwę dekoracyjną dla protez kończyn. XS i XF Cover stosuje się dla osób po amputacji kończyny dolnej powyżej kolana (AK), natomiast XT Cover dla osób po amputacji kończyny dolnej poniżej kolana (BK). Przed założeniem pokrycia na protezę proszę zapoznać się z zaleceniami producenta protezy, dotyczącymi jej użytkowania. Założenie pokrycia X Cover może zostać wykonane przez sprzedawcę protezy kończyny, zakład protetyczny lub przedszkolnego fachowca. Użytkownika należy poinstruować o prawidłowym postępowaniu z produktem. Pokrycie X Cover może zostać założone przez użytkownika protezy, pod warunkiem przestrzegania Instrukcji Użytkowania.

Pokrycia XS, XF oraz XT Cover

Jeśli do pokrycia X-Cover została dostarczona klamra stabilizująca, należy ją nałożyć na adapter protezy i dopasować miejsce mocowania nakładając pokrycie. Aby założyć pokrycie należy rozchylić tylne rozcięcia pokrycia na boki i nałożyć na protezę. Dopasować miejsce mocowania klamry we wgłębieniu pokrycia i przykręcić klamrę śrubami. Po nałożeniu pokrycia X Cover należy je docisnąć, **zaczynając od dołu** wzdłuż krawędzi, aby je połączyć.

Jeśli do pokrycia X Cover nie dołączono klamry stabilizującej, proszę założyć pokrycie. Jeżeli pokrycie XS lub XT Cover będzie przesuwane się podczas chodzenia, należy przykleić dostarczony rzep pomiędzy protezę i pokrycie w miejscu gdzie pokrycie wewnątrz styka się z protezą (np. z boku kolana czy adaptera rurowego). W przypadku pokryć XT Cover dostarczony rzep można przykleić pomiędzy lejem a pokryciem. Miejsce przyklejenia rzepu należy wcześniej bardzo dokładnie odtłuścić. Pokrycie X Cover odtuszczamy jedynie wewnątrz (!) acetonem, a miejsca na protezie np. denaturatem czy benzyną ekstrakcyjną. Proszę zwrócić szczególną uwagę, by nie stosować w/w produktów chemicznych na zewnętrznej stronie pokrycia, ponieważ powierzchnia wykończenia może ulec uszkodzeniu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Stosując pokrycie X Cover, proszę uwzględnić wytyczne producenta protezy, co do sposobów jej użytkowania.

Jeżeli X Cover ma być użytkowany przez dzieci, muszą zostać pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania. Konserwacja pokrycia musi się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.

O ile konstrukcja protezy kolana umożliwi klękanie, wówczas podczas użytkowania pokrycia X Cover proszę zachować ostrożność przy klękaniu oraz w miarę możliwości zastosować miękkie podłoże (np. podkładając coś miękkiego pod kolano).

Trzymać z dala od źródła ognia.

Unikać narażania nakładki na silne uderzenia, ściskanie elementów nakładki oraz na kontakt z ostrymi przedmiotami.

Nie wystawiać na długotrwałe silne nasłonecznienie, nie stawiać w pobliżu źródła ciepła.

Nie stosować preparatów chemicznych na zewnętrznej stronie pokrycia.

Jeśli proteza nie jest wodoodporna lub do uprawiania sportów wodnych, przy użytkowaniu pokrycia X Cover zachować ostrożność przy wykonywaniu czynności z użyciem wody, aby nie zamoczyć protezy kolana lub stopy.

Konserwacja

Czyścić wilgotną ściereczką.

Po zdjęciu pokrycia X Cover z protezy można czyścić je delikatnie ściereczką nasączoną wodą lub zanurzyć w wodzie. Do usunięcia zanieczyszczeń można użyć delikatnego środka czyszczącego w płynie lub mydła, wytrzeć do sucha.



WARUNKI GWARANCJI POKRYCIA

§1

NEXTT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (ul. Harcerska 6, 41-103 Siemianowice Śląskie) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000470222 oraz posiadająca numer NIP 643-176-35-79, zapewnia użytkownika o dobrej jakości produktu, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna.

§2

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 1 rok i liczy się od daty nabycia produktu, jednak nie więcej niż 13 miesięcy od daty produkcji. Wady produktu w okresie gwarancji powinny być zgłaszane mailem na adres nextt@nextt.pl.

§3

W przypadku wad lub uszkodzeń produktu mających wpływ na funkcjonalność produktu ujawnionych w okresie gwarancji NEXTT Sp. z o.o. bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt na nowy w możliwie najkrótszym terminie, pod warunkiem, że produkt jest używany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami producenta. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek normalnego użytkowania, a także czynności związane z konserwacją i czyszczeniem produktu.

§4

Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, jeżeli powstały one z przyczyn innych aniżeli tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu (tj. innych aniżeli wady powstałe z winy producenta na skutek wad fabrycznych i materiałowych). W szczególności gwarant jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli uszkodzenie powstało z winy kupującego. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek :

- Uszkodzeń mechanicznych, zarysowań, przegrzania produktu
- Nadmiernej eksploatacji produktu
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji
- Ingerencji w produkt, samowolnych napraw, przeróbek i zmian w produkcie, ingerencji nieuprawnionych osób trzecich
- Użycia niewłaściwych materiałów konserwujących
- Zabrudzenia, przebarwień na skutek kontaktu z substancjami chemicznymi lub kosmetykami

